


Luvas de Polietileno



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Regulamentação	Regulation (EC) 1935/2004 Regulation (EU) 10/2011
Normas	ISO/IEC 17025 ; EN1186-3:2002 ; EN1186-14:2002 ; EN 13130-1:2004
Fabricante	RIZHAO HAICHUAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD Linguanzhuang Town, Ju countrym Rizhao city, Shandong Province, China
REF	LP01
Nome Produto	Luvas de Polietileno Descartáveis
Material	Polietileno
Cor	Transparentes
Textura	Superfície lisa sem textura
Tamanhos	Único
Dimensão da Luva	260*250mm
Espessura	0,0085mm PE

INSTRUÇÕES (COMO COLOCAR AS LUVAS)

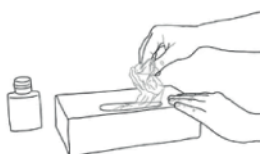

1. Depois de lavar bem as mãos, retirar 1 luva da caixa original



2. Tocar apenas em zonas restritas da luva, correspondendo à região do pulso



3. Colocar a 1ª luva



4. Retirar a 2ª luva, tocando apenas na zona correspondente à região do pulso



5. Para evitar tocar na pele do antebraço com a luva já vestida, pegar na superfície externa da luva que estamos a vestir, com os dedos dobrados da outra mão



6. Uma vez colocadas as luvas, as mãos não devem tocar em mais nada que não seja o que está contemplado no procedimento a efetuar

Descrição Geral

As luvas de polietileno (P.E.) transparentes e leves. Ideal para indústria alimentar, laboratórios, veterinários, indústria farmacêutica, hospitais.

OUTROS DETALHES

1. Sem látex, reduzindo o risco de hipersensibilidade, alergia e reações.
2. Material flexível para melhor sensação e ajuste, reduzindo o desgaste prolongado.
3. Sem pó para reduzir a contaminação potencial por poeira.
4. Luva descartável para uso em procedimentos não cirúrgicos.
5. Armazenar em local seco, longe da luz solar direta e do calor.

