

CONTENTOR DESCARTÁVEL P/ ELIMINAÇÃO DE OBJECTOS CORTANTES E PERFURANTES 10LT



DESCRIÇÃO GERAL

Contentor descartável para a eliminação de objectos cortantes e perfurantes. Indicado para agulhas médicas descartáveis, bisturis, catéteres intravenosos, tecido humano, sangue humano, resíduos de laboratório que contêm agentes causadores de doenças humanas e fluidos corporais.

Estes contentores podem armazenar, transportar e descartar resíduos em hospitais, clínicas, laboratórios e também serviços de apoio domiciliário. Contém uma tampa translúcida que evita o enchimento excessivo e possui um fecho definitivo que evita reaberturas. Para uso exclusivo por profissionais.

USO PRETENDIDO

O contentor foi concebido para permitir a eliminação segura de material cortante/perfurante e resíduos médicos. Podem recolher, armazenar, transportar e eliminar o lixo médico em hospitais, clínicas e cuidados familiares.



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

REGULAMENTAÇÃO	Diretiva 2001/95/CE
NORMA	BS EN ISO/IEC 107065:2012 ; BS7320:1990 ; AS4031:1992 ; NF X 30-500
FABRICANTE	Cixi Kangyuan Medical Technology Co., Ltd 6, Lane 39, Mingxing East Road, Hubin village, Guanhaiwe Town, Cixi City, Zhejiang Province, China
REPRESENTANTE UE	ISET.r.k Unipersonale Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN)
REF	F10A
NOME DO PRODUTO	Contentor Descartável p/ Eliminação de Objectos Cortantes e Perfurantes 10LT
DESIGN	Contentor de Forma Rectangular com Sistema de fecho na tampa
MATERIAL	Polipropileno (PP)
COR	Amarelo + Vermelho
CAPACIDADE	10L
DIMENSÕES	25*20*28,5MM
VALIDADE	5 anos
DATA DE EMISSÃO DAS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Junho 2019

OUTRAS CARACTERÍSTICAS


- * À prova de fugas e resistente a perfurações;
- * Encerramento temporário e encerramento definitivo;
- * Fechadura de perímetro segura para uso e transporte seguros;
- * Fácil de manipulação;
- * Detalhes completos do rótulo;
- * Seguro para a saúde humana e ambiente.

RECURSOS

- * À prova de vazamento e resistente a perfurações;
- * Sistema de fechamento intermediário na tampa;
- * A tampa translúcida evita o enchimento excessivo;
- * Desenho de vários traços para facilitar a remoção da agulha;
- * Sistema de fecho definitivo que evita reabertura;
- * Linha de enchimento visível no contentor para evitar derramamento.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1.MONTAGEM

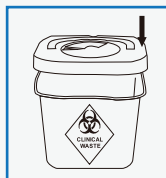


2.ENCERRAMENTO TEMPORÁRIO



3.LIBERTAÇÃO DA TAMPA



4.ENCERRAMENTO FINAL

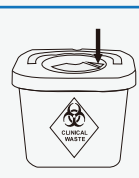

ADVERTÊNCIAS

- * Colocar o contentor próximo da área de utilização e em local seguro;
- * Utilizar equipamento de proteção individual adequado;
- * Realizar a posterior higienização das mãos;
- * Não reencapsular agulhas.

CONTENTOR DESCARTÁVEL P/ ELIMINAÇÃO DE OBJECTOS CORTANTES E PERFURANTES 10LT



DESCRIÇÃO GERAL

Contentor descartável para a eliminação de objectos cortantes e perfurantes. Indicado para agulhas médicas descartáveis, bisturis, catéteres intravenosos, tecido humano, sangue humano, resíduos de laboratório que contêm agentes causadores de doenças humanas e fluidos corporais.

Estes contentores podem armazenar, transportar e descartar resíduos em hospitais, clínicas, laboratórios e também serviços de apoio domiciliário. Contém uma tampa translúcida que evita o enchimento excessivo e possui um fecho definitivo que evita reaberturas. Para uso exclusivo por profissionais.

USO PRETENDIDO

O contentor foi concebido para permitir a eliminação segura de material cortante/perfurante e resíduos médicos. Podem recolher, armazenar, transportar e eliminar o lixo médico em hospitais, clínicas e cuidados familiares.



LIMITAÇÕES AO USO

O artigo é de utilização única. Não acondicionar resíduos acima do limite de enchimento.

INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os artigos que aguardam utilização devem ser guardados num local seco, fechado, ventilado e resguardados de potencial contaminação. Em caso de defeito ou dano não use o artigo, substitua por outro.

ELIMINAÇÃO

Os profissionais devem colocar os resíduos, previamente acondicionados na(s) ocorrência(s), no interior do contentor respetivo, podendo e devendo ser usada a sua capacidade máxima para o efeito. Depois de cheio, o contentor deve ser encerrado pelos operacionais fazendo uso do sistema de fecho do contentor, de modo a permitir posterior recolha. Deve respeitar-se o circuito interno de eliminação e os cuidados no acondicionamento dos resíduos perigosos.

EM CASO DE INCIDENTE

Em caso de incidente grave ocorrido com o contentor deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou doentes estão estabelecidos.

APRESENTAÇÃO

